

## MODO DE EMPLEO



**1.** Abra el empaquetado y retire la **Combat Gauze**. Conserve el empaquetado vacío.



**2.** Coloque la **Combat Gauze** dentro de la herida y utilícela para aplicar presión directamente sobre el origen de la hemorragia. Se puede requerir más de una **Combat Gauze**.



**3.** Siga aplicando presión durante 3 minutos o hasta que la hemorragia se detenga.



**4.** Envuelva y ate un vendaje para mantener la presión. Busque atención médica de inmediato. Muestre las instrucciones de **RETIRO DEL PRODUCTO** que se encuentran en el empaquetado al personal médico.



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht  
20  
2514 AP  
The Hague  
The Netherlands

**RETIRO DEL PRODUCTO:** 1. Retire suavemente la gasa de la herida. 2. Irrigar abundantemente la herida.

### Fabricado por:

Z-Medica®, LLC  
4 Fairfield Boulevard  
Wallingford, CT 06492 USA  
Tel: 1.877.750.0504, +1.203.294.0000  
Fax: 1.800.343.8656, +1.203.303.7216  
QuikClot.com  
Patentes: Z-Medica.com/patents.aspx  
© 2018 Z-Medica, LLC  
Todos los derechos reservados.  
Contiene caolín.  
100518-05-WEBESLA Rev D 2023-10

### PARA EL USO POR PERSONAL DE EMERGENCIA ENTRENADO



**ADVERTENCIAS:** Solo para uso externo. No se garantiza la esterilidad si el empaquetado está dañado o abierto. Descarte el empaquetado si está dañado. Evite el contacto con los ojos. La reutilización causará riesgo de infección y pérdida de eficacia.

Hecho en EE. UU.



NSN 6510-01-562-3325

UN (1) APÓSITO HEMOSTÁTICO DE 7,5 CM X 3,7 M (3 IN X 4 YD)

Empacado al vacío y doblado en Z  
Para uso externo temporal para  
controlar hemorragias traumáticas



# QuikClot® COMBAT GAUZE