

MODO DE EMPLEO



1. Abra el empaquetado y retire la **Combat Gauze LE**. Conserve el empaquetado vacío.



2. Coloque la **Combat Gauze LE** dentro de la herida y utilícela para aplicar presión directamente sobre el origen de la hemorragia. Se puede requerir más de una **Combat Gauze LE**.



3. Siga aplicando presión durante 3 minutos o hasta que la hemorragia se detenga.



4. Envuelva y ate un vendaje para mantener la presión. Busque atención médica de inmediato. Muestre las instrucciones de **RETIRO DEL PRODUCTO** que se encuentran en el empaquetado al personal médico.

CE
2797

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP
The Hague
The Netherlands

RETIRO DEL PRODUCTO: 1. Retire suavemente la gasa de la herida. 2. Irrigar abundantemente la herida.

Fabricado por:

Z-Medica®, LLC

4 Fairfield Boulevard

Wallingford, CT 06492 USA

Tel: 1.877.750.0504, +1.203.294.0000

Fax: 1.800.343.8656, +1.203.303.7216

QuikClot.com

Patentes: Z-Medica.com/patents.aspx

© 2018 Z-Medica, LLC

Todos los derechos reservados.

Contiene caolín.

100885-02-WEBESLA Rev D 2023-10



Hecho en EE. UU.

PARA EL USO POR PERSONAL DE EMERGENCIA ENTRENADO



STERILE R

MD Dispositivo médico

ADVERTENCIAS: Solo para uso externo. No se garantiza la esterilidad si el empaquetado está dañado o abierto. Descarte el empaquetado si está dañado. Evite el contacto con los ojos. La reutilización causará riesgo de infección y pérdida de eficacia.

QuikClot[®]

COMBAT



GAUZE[®] **LE**

Empacado al vacío y doblado en Z

**Para uso externo temporal para
controlar hemorragias traumáticas**

UN (1) APÓSITO HEMOSTÁTICO DE 7,5 CM X 3,7 M (3 IN X 4 YD)

